

モデルカップを使用しての模型作り



〒770-0873

徳島県徳島市東沖洲2丁目50番地

TEL.088-679-1272 FAX.088-679-1273

<http://dcc.dental/>



モデルカップ使用例




T3

単冠など



T14

前歯
両側ブリッジなど

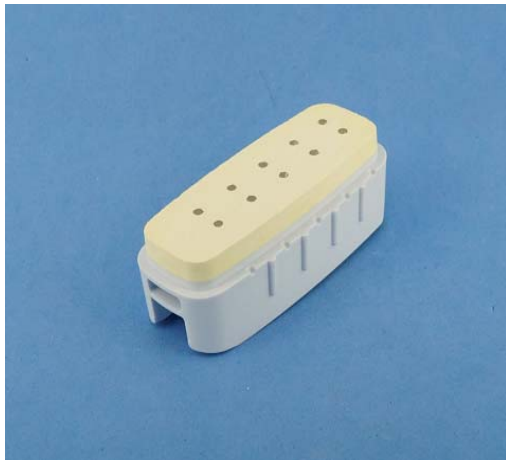

T5

単冠
ブリッジなど



モデルアダプター
NKタイプ

南加台
咬合器に
使用出来ます

新商品

印象模型のカット

モデルカップに接着する基底面を平らにして下さい






作業模型の接着

模型を乾燥させ基底面に接着剤を多めに塗布し
モデルカップへ圧接して下さい



硬化促進剤を使用すれば接着時間の短縮に繋がります


セパレートポイント

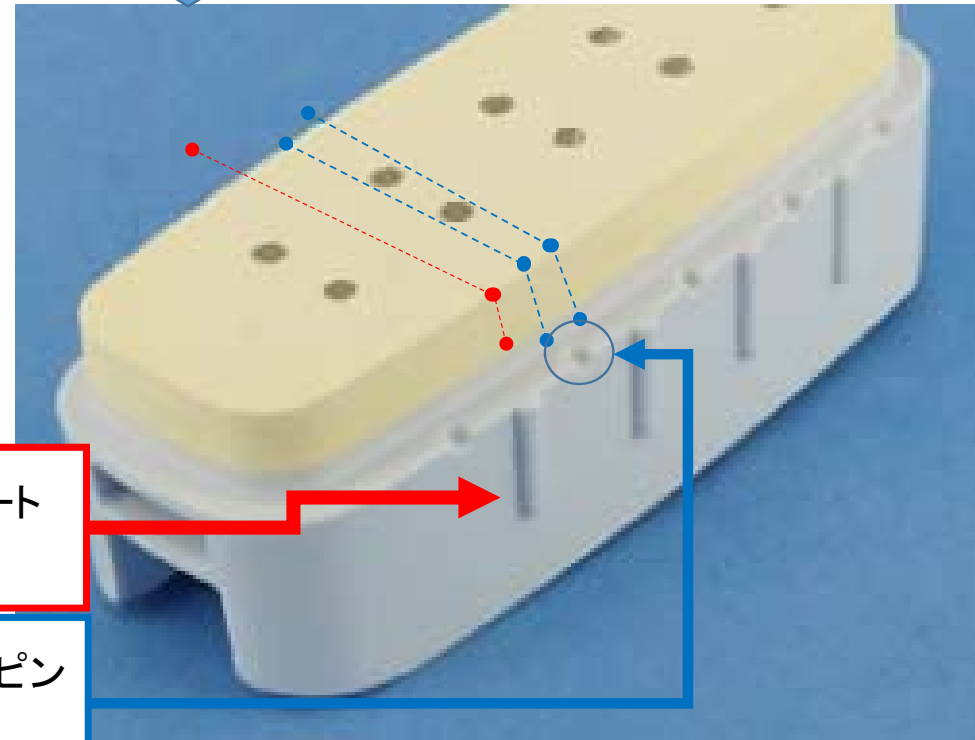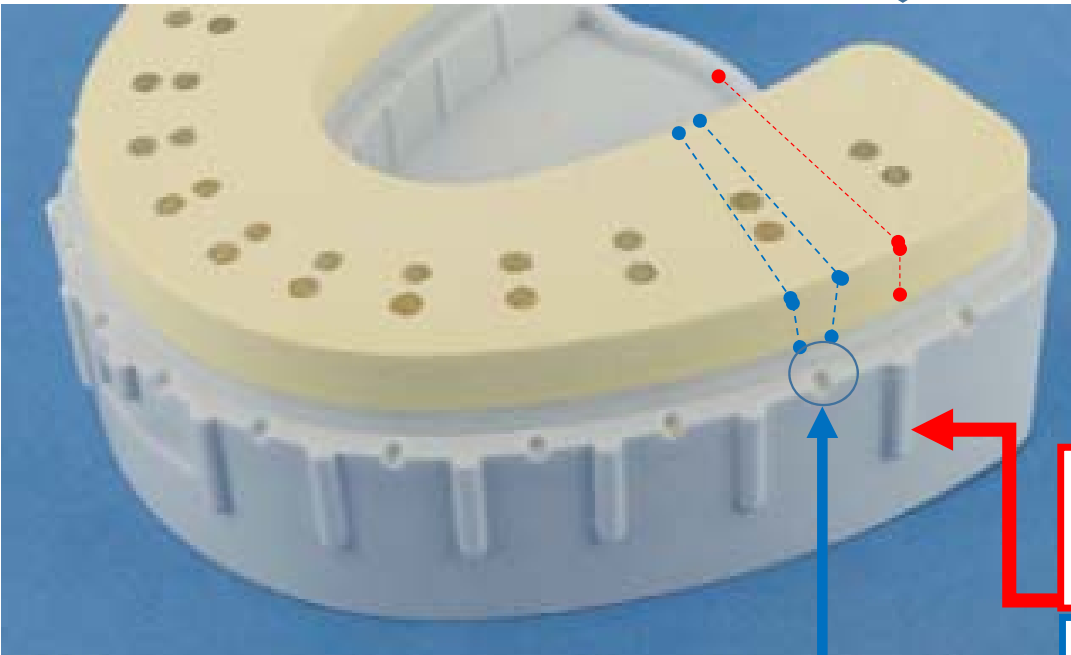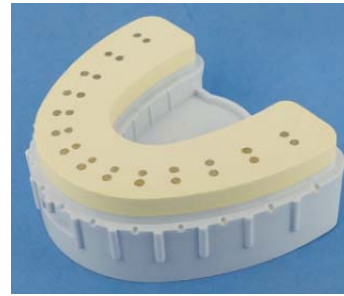

セパレート
位置


ダウエルピン
位置

セパレート&トリミング

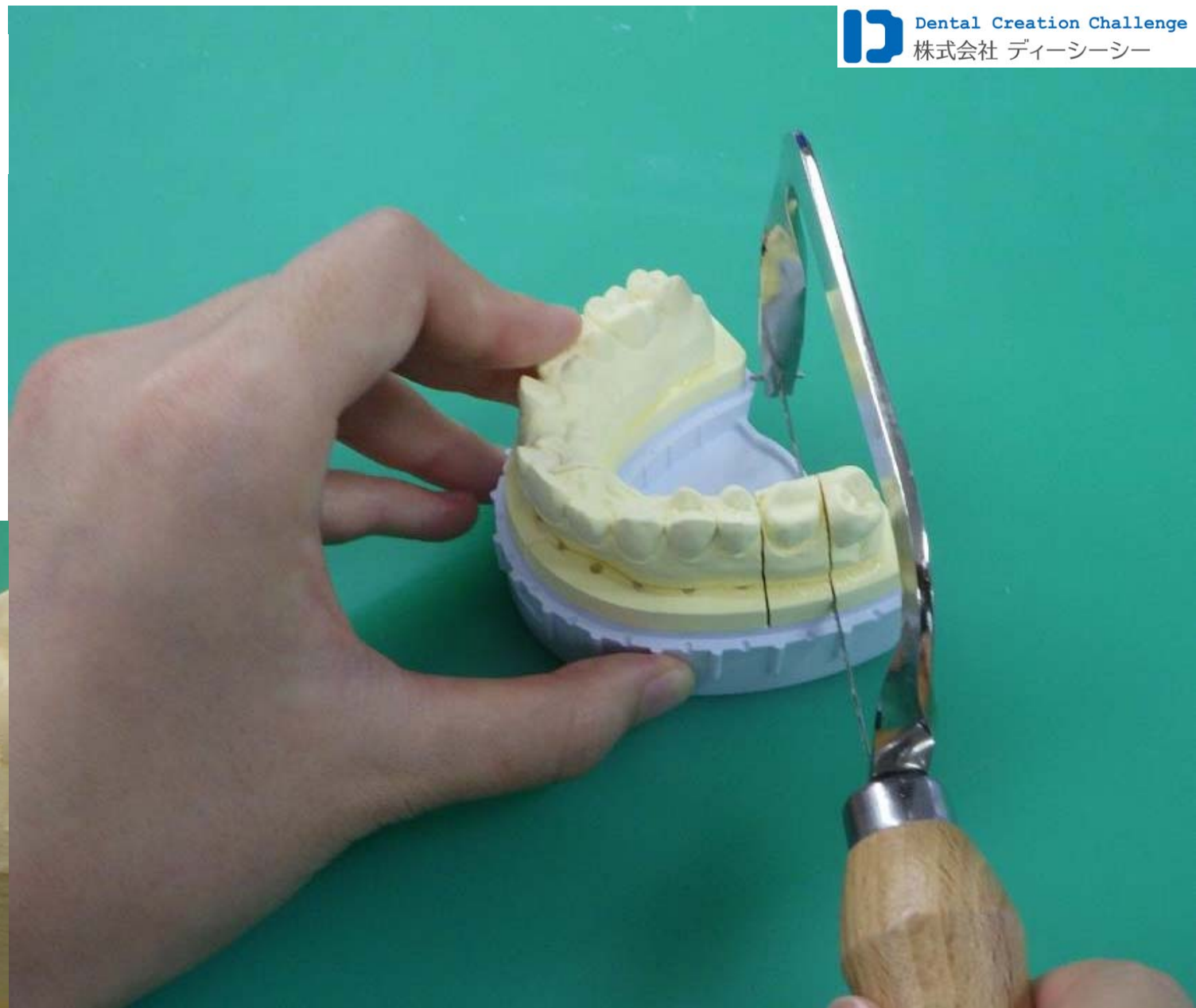

南加台咬合器へNKアダプター装着






ツメ部分3箇所へ南加台アーチ部をパチンとはめ込んで下さい。
※上顎・下顎どちらも使用出来ます。

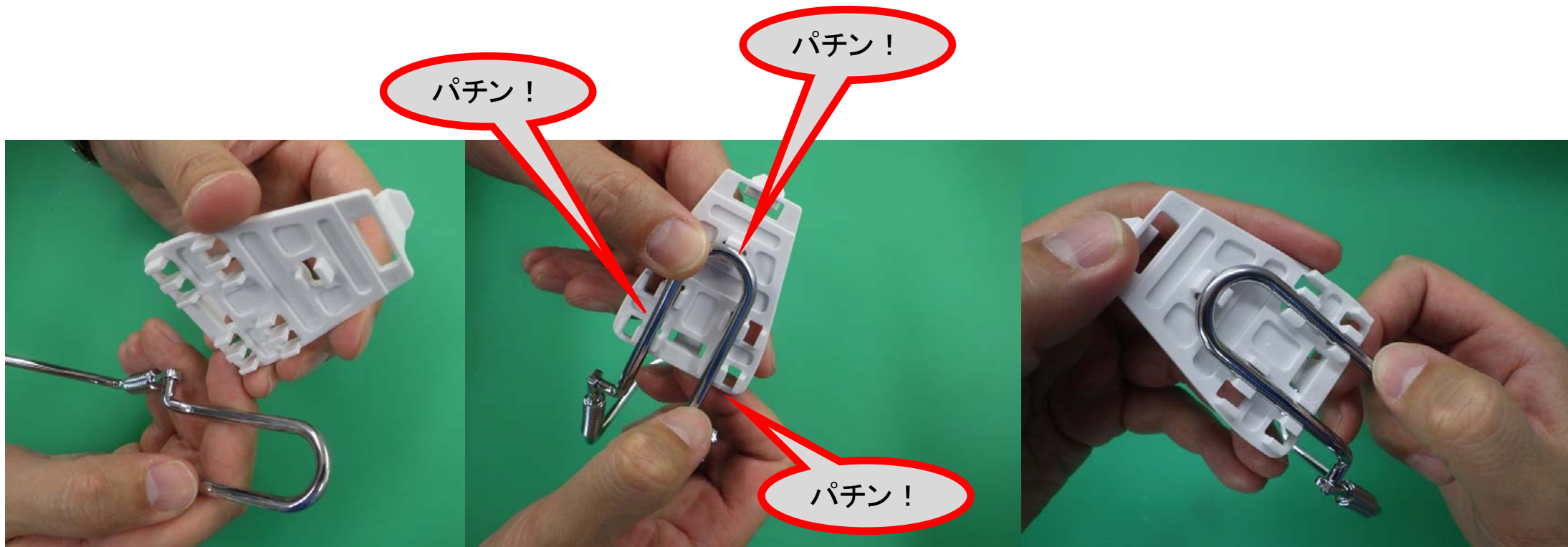

アダプター装着完成

アタプターへ模型装着


後方のフック部を引っ掛け前歯部のフック部を少し広げパチンと装着して下さい

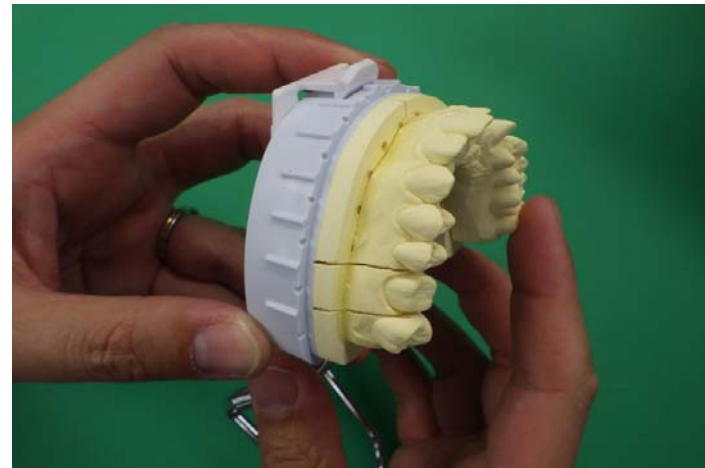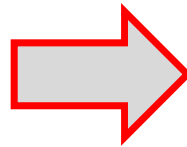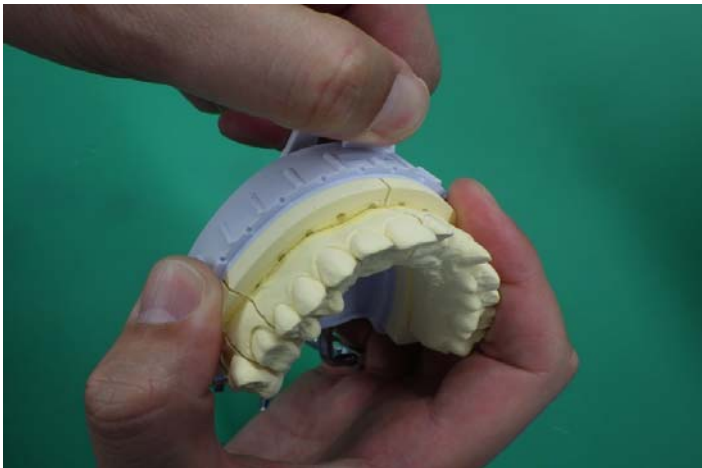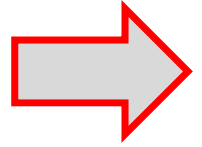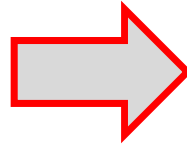

模型
装着完成

アタプターへ模型装着

対合歯は石膏で装着して下さい。

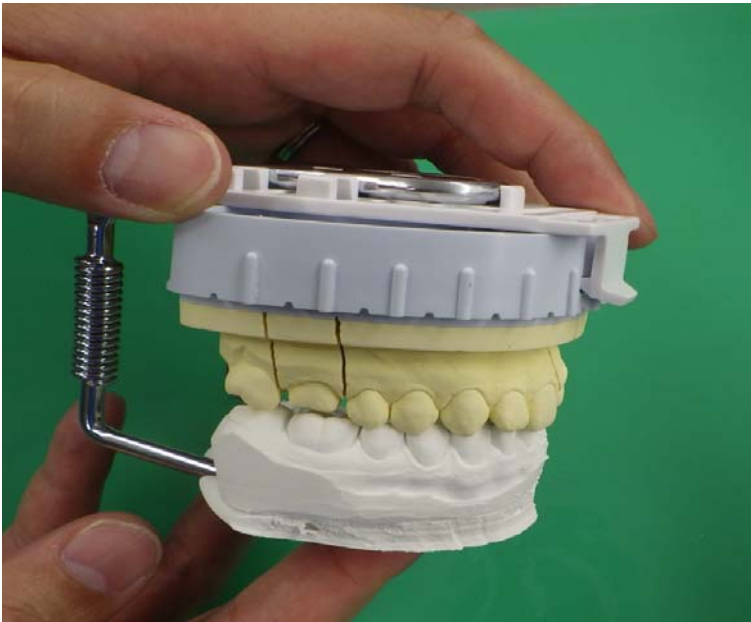

模型作り完成

モデルカップを使用する事により模型作りの時間短縮に繋がります。

各種商品サンプルをご用意しておりますので是非1度お問合せ後
お試し下さい。

